

Sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en metformine

Vastentest IETZ

Vastentest IETZ

Versie 5

Datum 7-1-2022



Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

Als onderdeel van iDoc ETZ Vastentest IETZ, resultaat volgt binnen 14 dagen. Vraag de bepaling aan als 'Verzending KFL in urinebuis'. Indien CITO moet worden bepaald, neem contact op met de dienstdoende ziekenhuisapotheeker.



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd en geschiedt een keer per maand. Indien CITO dient dienstdoende apotheker ETZ vooraf overleg te plegen met dienstdoende laboratoriumapotheeker UMCU tel 088-7574488.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

Farmalab UMC Utrecht

<https://www.umcutrecht.nl/nl/farmalab>

Normaal

Positief/Negatief*

Bepaling van componenten van 3 klassen orale antidiabetica: sulfonylureumderivaten, thiazolinedionen en metformine. Analyse kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of ter controle van compliance.

De onderstaande componenten zijn opgenomen in de analyse:

- Metformine
- Rosiglitazon
- Tolbutamide
- Pioglitazon
- Gliclazide
- Glimpiride
- Glibenclamide
- Repaglinide

Toxisch

-

Klinische betekenis

*Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/L gehanteerd.

-

Overige opmerkingen

-

Sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en metformine

Vastentest IETZ

Vastentest IETZ

Versie 5

Datum 7-1-2022

Uitvoerende instelling

Laboratorium

Universitair Medisch Centrum Utrecht Laboratorium Apotheek
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL

LIMS-code

OPSTU

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties

1. Toine Egberts, Afkapwaarde creatinine bij onderzoek van urine op drugs http://kkgt.nl/?page_id=540.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M219)

Scope

KF.TOX.02

NZA code

072903

Wijzigingen

20220107 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.

20190806 ML: Vraag de bepaling aan als 'Verzending KFL in urinebuis' toegevoegd bij opmerkingen. LIMS code gewijzigd van OPST naar OPSTU. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd.

20170713 ML: Typefout hersteld (volt => volgt bij opmerkingen). Graden genoteerd achter kamertemperatuur.

20170707 VA: Eerste versie monografie Sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en metformine in urine geschreven.