

Opioiden

Morfine, Codeïne, Heroïne

Drugs

Versie 9

Datum 21-6-2023



Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

-



Bepalingsfrequentie

Dagelijks

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: [Toxicologie.org](https://www.toxicologie.org)

-

Normaal

Positief/Negatief

<https://www.toxicologie.org>

-

Afkapwaarde: 300 ng/mL

Toxisch

-

Klinische betekenis

Opiaten zijn 2-4 dagen aantoonbaar in urine, afhankelijk van welke opiaat is gebruikt.

De volgende stoffen reageren positief met de drugstest voor opiaten: codeïne, heroïne, 6-monoacetylmorfine (6-Mam), morfine, morfine-3-glucuronide, morfine-6-glucuronide.

Deze informatie is afkomstig van de fabrikant van de test.

Fentanyl, tramadol en buprenorfine worden niet gedetecteerd met deze analyse.

Informatie met betrekking tot vals-positieve of vals-negatieve uitslagen is beschikbaar via het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL). Bij twijfel aan de uitslag kan een bevestigingsonderzoek worden aangevraagd.

Overige opmerkingen

-

Opioiden

Morfine, Codeïne, Heroïne

Drugs

Versie 9

Datum 21-6-2023

Uitvoerende instelling

Laboratorium

ETZ Loc. TweeSteden ziekenhuis
Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

Analisten KFL

LIMS-code

OPIK

Bepalingsmethode

Immuno-assay

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

Bij vragen over kruisreactiviteit zie ETZ - KFL TDM TOX PCS Kruisreactiviteitenlijst drugsscreening (023475).

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. Moeller KE, Lee KC, Kissack JC. Urine drug screening: practical guide for clinicians. Mayo Clin Proc. 2008 Jan, 83(1) 66-76.
2. Monografie Opioiden Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (versie 01-2010).
3. Drugs of Abuse. DRI® Cross-Reactivity Guide revision 15. Thermo scientific (opioïden).
4. Detection time of drugs in Urine www.nal-vonminden.com Geraadpleegd op 03-09-2015.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M064)

Scope

KF.TOX.03

NZA code

072812

Wijzigingen

- 20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.
- 20220105 VvW: Tekstuele aanpassingen.
- 20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.
- 20190902 ML: Toegevoegd 'Fentanyl, tramadol en buprenorfine worden niet gedetecteerd met deze analyse.'
- 20181001 ML: 1 bij LIMS code verwijderd. Telnr ziekenhuisapotheeker gewijzigd.
- 20170709 ML: Locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
- 20170630 ML: Sein EZ van 5510 naar 6510. Zin over tramadol welke niet wordt gedetecteerd toegevoegd.
- 20170220 ML: ETZ bij uitvoerende instelling i.p.v. TSZ. Benaming locatie TSZ en EZ bij contactpersoon. Literatuur geüpdatet. Veld 'Aanwijzingen voor analist' en veld 'wijzigingen' toegevoegd. Tekst bij NB over positieve componenten methode aangepast en 'laboratorium' vervangen door KFL. Toevoeging mogelijkheid tot bevestigingsonderzoek.