

Flupentixol

Flupentixol in serum

Zie

[synoniemen] → Fluanxol

Monstermateriaal

Stolbuis met rode dop (zonder gel)

**Hoeveelheid**

1 volle buis (6 ml)

LIMS-code

FLUPB

Opmerkingen**Referentiewaarden**Therapeutisch:

Onderhoudsbehandeling schizofrenie: 1-10 µg/L

Acute fase (psychose): tot 15 µg/L

Toxisch: > 15 µg/L**Opmerking****Bewaarconditie**

Diepvries (-15 tot -25 °C)

Frequentie

Dit is een verstuurd bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen

Uitvoerende instellingUMC Groningen
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)**Contactpersoon**

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Transportcondities

Gekoeld (2-8 °C)

NB

Halfwaardetijd: oraal 35 uur; intramusculair 3 weken

Eiwitbinding: 99%

Biol. beschikbaar: oraal 40%

Tmax: oraal 1 - 8 uur; intramusculair 5 dagen

Klaring: 0,29 - 0,46 L/min

Vd.: 12 - 14 L/kg

pKa.: 3,4 en 6,2

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Aanwijzingen voor analist**Externe kwaliteitscontrole** Bepaling valt onder ISO 15189 accreditatie

Literatuur

TDM monografie Flupentixol UMCG bepalingenwijzer. Geraadpleegd op 21-03-2019.
Telefonisch contact UMCG labapotheek op 29-04-2016

Wijzigingen

20210106 KL: uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.
20190923 ML: LIMS code van FLUP naar FLUPB.
20190321 ML: bewaar- en verzendconditie gewijzigd van kamertemperatuur naar resp diepvries en gekoeld n.a.v. wijziging monografie UMCG. Literatuur gewijzigd.
20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code.
20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving.
Externe kwaliteitscontrole gewijzigd van KKGt naar ISO.
Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd.
Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017