

INFLIXIMAB

Infliximab in serum

Zie [synoniemen] → Remicade, Inflectra, Remsima**Monstermateriaal** Stolbuis met rode dop (zonder gel)**Hoeveelheid** 1 volle buis (6 ml)**LIMS-code** CINFL = cascade infliximab
INIG = alleen antistoffen tegen infliximab**Opmerkingen** Het is belangrijk om het bloedmonster vlak voor de nieuwe dosis van het geneesmiddel af te nemen (dalspiegel), omdat complexvorming tussen het medicijn en de antistof zou kunnen leiden tot fout-negatieve uitslagen.**Referentiewaarden** Therapeutisch infliximab: 3-7 mg/l**Antistoffen**

Indien de uitslag <12 AE/mL: Antistoffen tegen infliximab niet aantoonbaar. Het resultaat is lager dan de LoD (Limit of Detection, detectiegrens).

Indien de uitslag 12-30 AE/mL: Antistoffen tegen infliximab aantoonbaar, maar niet kwantificeerbaar. Het resultaat valt tussen LoD (Limit of Detection, detectiegrens) en LLoQ (Lower Limit of Quantification, onderste bepalingsgrens).

Indien de uitslag >30 AE/ml: Antistoffen tegen infliximab positief, het resultaat is hoger dan de LLoQ (Lower Limit of Quantification, onderste bepalingsgrens).

Opmerking Indien de gemeten spiegel van infliximab lager is dan verwacht, kan dit een indicatie zijn voor de aanwezigheid van antistoffen tegen infliximab. Het KFL maakt gebruik van de aanvraagoptie 'cascade' van Sanquin, waarbij initieel de serumspiegel van infliximab wordt bepaald. Alleen wanneer de infliximab spiegel < 1 mg/l is, wordt tevens een antistofbepaling uitgevoerd.

De infliximab assays meten spiegels en antilichaamrespons tegen verschillende infliximab biologicals, als verkocht onder de verschillende merknamen Remicade, Inflectra en Remsima.

Bewaarconditie Koelkast (2-8°C)

Frequentie	Serumspiegel: door LMMI op woensdag. Antistoffen: door Sanquin. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Uitvoerende instelling	Infliximab serumspiegel: LMMI ETZ (advisering via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ) Infliximab antistoffen: Sanquin (via LMMI ETZ, advisering via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)
Contactpersoon	Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696
Transportcondities	Kamertemperatuur (15-25 °C)
NB	Infliximab is een monoklonale antistof tegen TNF- α . Het is zinvol om een spiegel te bepalen indien een patiënt onvoldoende reactie laat zien op infliximab. Indien de infliximab spiegels laag is kan dit veroorzaakt worden door antistofvorming. Het is dan zinvol om een antistof bepaling uit te laten voeren. Bij een lage antistoftiter kan dosis ophoging zinvol zijn, bij een hoge antistoftiter wordt aangeraden op een ander TNF-blokker over te gaan. Halfwaardetijd: 8-9,5 dagen. Bij de meeste mensen is infliximab na 8-12 weken nog aantoonbaar in serum. Het klinisch effect treedt na enkele weken in. <u>Methode</u> ELISA <u>Externe kwaliteitscontrole</u> KKG
Aanwijzingen voor analist	PETIT studie: materiaal van moeder en kind (uit navelstreng). Bij opsturen naar Microvida, noteer 'geen antistoffen i.v.m. PETIT studie' op het dupje. Bij vragen: j.wieringa@erasmusmc.nl.
Literatuur	1. Sanquin Diagnostiek (www.sanquin.nl), geraadpleegd 15-07-2021. 2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd 19-04-2016.
Wijzigingen	20210715 ML: referentiewaarden antistoffen uitgewerkt. Tekst aanwijzingen voor analist toegevoegd t.a.v. PETIT studie. 20210106 KL: advisering via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt advisering via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ. 20201201 KL: Frequentie verandert van maandag naar woensdag. 20181004 ML: Frequentie en uitvoerende instelling gewijzigd n.a.v. change 67250. Uitvoering serumspiegel door LMMI ETZ i.p.v. Sanquin. Externe kwaliteitscontrole door KKG. Telnr dienstdoende apotheker gewijzigd. 20170708 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 20170619 ML: tekst over generieke infliximab toegevoegd n.a.v. informatie Sanquin. 20160415 KL: Toegevoegd kop aanwijzingen voor analisten en wijzigingen.

Contactpersoon: sein 3366 locatie TSZ en 5510 locatie EZ. Literatuur geraadpleegd op 19-04-2016. Koelkast toegevoegd bij 2-8°C.