

**Posaconazol***Noxafil, POSA FLU trial*

Antimycotica

Versie 6

Datum 1-3-2022

**Afnamemateriaal**

Plasma

**Buistype + volume + kleur**

Heparinebuis met groene dop

1 volle buis (6 mL)

-

-

Groen



-

**Afamecondities**

-

**Bepalingsfrequentie**

Bepaling op dinsdag en vrijdag.

Het materiaal moet voor 09:30 uur aanwezig zijn op het KFL.

**Referentiewaarden**

Voor meer informatie zie: -

-

**Normaal**

Primaire profylaxe &gt;0,7 mg/L

Secundaire profylaxe &gt;0,7-1,0 mg/L

Primaire therapie dalspiegel &gt; 1,0 mg/L

Salvage therapie dalspiegel &gt; 1,25 mg/L

**Toxisch**

-

**Klinische betekenis**

-

**Overige opmerkingen**

-

**Posaconazol***Noxafil, POSA FLU trial*

Antimycotica

Versie 6

Datum 1-3-2022

**Uitvoerende instelling****Laboratorium**

ETZ Loc. TweeSteden ziekenhuis  
Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

**Analisten KFL****LIMS-code**

POSAG

**Bepalingsmethode**

HPLC

**Verzendconditie**

Kamertemperatuur (15-25 °C)

**Bewaarconditie**

Diepvries (-15 tot -25 °C)

**Opmerkingen**

Aanvragen voor POSA FLU trails komen vanaf IC met aanvraagformulier ('trialbon') van het Radboud. Etiketten worden ook geleverd. Uitslagen komen niet in LIS of EPD.

Bij ontvangst:

- noteer op formulier 'Bijlage 1: Transport and storage of PK samples':
- datum en tijd aankomst KFL (arrival pharmacy fridge)
- monsternummer
- draai plasma af
- voorzie buisje met plasma van 3e trialsticker (identificatie)
- plasma opslaan in diepvries (-15 tot -25 °C)
- noteer op formulier 'Bijlage 1: Transport and storage of PK samples' datum en tijd wanneer in diepvries opgeslagen.

Monsters worden batchgewijs opgehaald door Radboud UMC.

**Contactpersoon**

Dienstdoende ziekenhuisapotheeker ETZ, tel. 013-2215696.

**Referenties**

1. Draaiboek onderzoeksproject POSA FLU / AKF2512.
2. Bepalingenwijzer UMCG, geraadpleegd 10-11-2020.
3. Info per mail van RadboudUMC, 27-10-2020 (zie change 102458).

**ISO-15189 scope**

ISO 15189:2012 (M064)

**Scope**

KF.TDM.01

**NZA code**

072894

**Wijzigingen**

20220301 KL: Bepalingsfrequentie aangepast van <48 uur naar dinsdag en vrijdag. Uitvoerende instelling van Radboud naar ETZ. Link 2 verwijderd. ISO nr aangepast van Radboud naar ETZ. Scope aangepast van 02 naar 01.

20220107 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20210611 ML: LIMS-code toegevoegd n.a.v. change 102458 voor reguliere aanvragen. Enkelvoudige LIMS-code POSA, groepscode met medicatievelden POSAG. LIMS-code toegevoegd. Aanwijzingen voor analist aangevuld. Literatuur geupdate met bron Radboud en UMCG.

20210108 KL: Referentie waarden toegevoegd en bewaarconditie veranderd naar diepvries.

20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.